

Médaille (pendentif)

Référence : D 117 910

Bracelet (option)

Référence : D 117 911

05-07-2018 - V1.0

Mode d'emploi

Généralité

Dès que le bouton-poussoir est enfoncé, une alarme est envoyée et une Led rouge s'allume derrière le bouton-poussoir. L'émetteur est disponible en versions anthracite et rouge. L'émetteur peut être porté autour du cou à l'aide du cordon fourni en standard. Au moyen de l'article "1184-strap" (en option), l'émetteur peut également être utilisé au poignet. Il n'est pas nécessaire de démonter l'émetteur pour monter ce bracelet. La bande élastique en tissu doux peut facilement être enfilée. Le capteur fonctionne avec les récepteurs Daza et les Pager Daza.

Fonctionnalité

L'émetteur est activé en appuyant sur le bouton-poussoir. L'émetteur émet une d'alarme, quelle que soit la pression sur la touche. Il est étanche à l'eau et à la poussière (IP67) et peut donc être porté sous la douche.

Le médaillon envoie un code unique qui ne peut être reçu que par un récepteur Daza ou un pager*. Il doit être reconnu par le récepteur ou le pager. Consultez le manuel correspondant.

Lorsque vous appuyez sur le bouton, la Led rouge située derrière le bouton s'allume pour indiquer que le bouton a été activé correctement et que le message d'alarme est en cours d'envoi (Figure 1).

Si la Led clignote lorsque vous appuyez sur le bouton, cela signifie que la batterie est faible et doit être remplacée dès que possible. Le message de batterie vide est également envoyé avec le code et sera donc également communiqué sur le récepteur ou le pager.

L'émetteur de cou est livré en standard avec un cordon de cou. Le cordon a un fermoir de sécurité. Si vous tirez sur le cordon, il s'ouvrira pour éviter les blessures (figure 2).

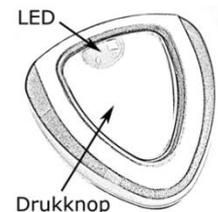
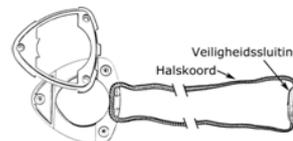


Fig.1: Bouton-poussoir + LED

Fig.2 : cordon de cou + fermoir de sécurité

La batterie de type CR2032 a une durée de vie allant jusqu'à 32 000 appels. L'ouverture de médaillon pour remplacer la pile se fait en desserrant les 3 vis situées à l'arrière. Maintenant, le cadre arrière peut être retiré (entre lequel le cordon cervical est verrouillé), puis le boîtier peut être ouvert.

Attention : enlever la batterie avec précaution, le support de batterie est un élément fragile.

* Récepteur de mi-septembre 2007 (reconnaisable par "V1.6" sur le numéro de série).

* Un Pager à partir de début octobre 2007 (au démarrage, P16, 3_0, ON (ou P32, 3_0, ON) est visible à l'écran).

Abilanx Park Avenue Rue Léon Griffon 56890 Saint Avé

Tél : 02 97 63 70 46 Fax : 02 97 63 74 90 Courriel : contact@abilanx.com

Web : www.abilanx.com