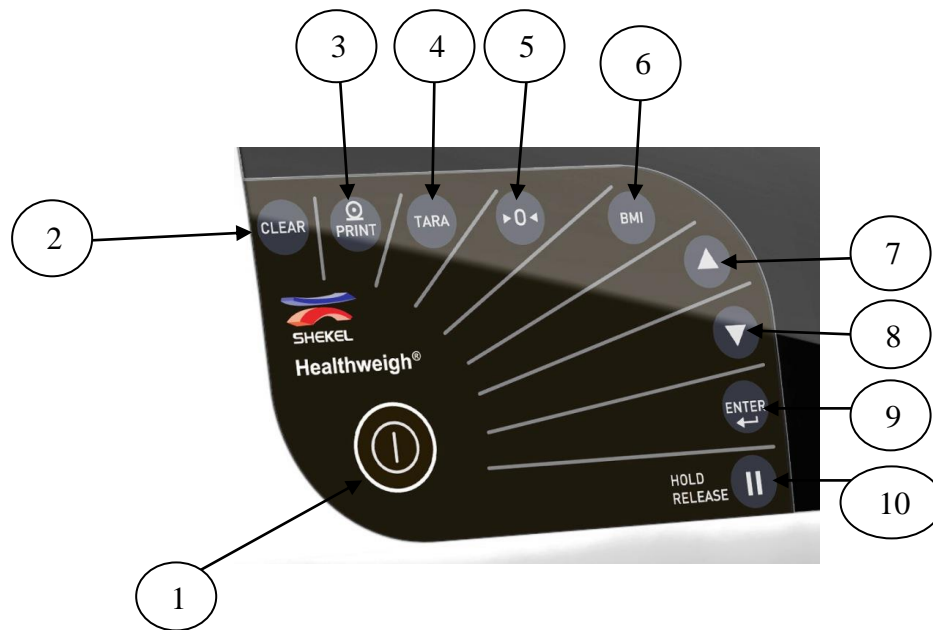


Façade de l'indicateur



Touches et fonctions :

- N° 1 ON / OFF : mise en route et extinction
- N° 2 CLEAR : fonction permettant d'effacer l'IMC et de revenir au poids affiché
- N° 3 PRINT : fonction permettant d'imprimer le poids affiché
- N° 4 TARE : fonction permettant de tarer un poids posé ou un poids connu
- N° 5 ZERO : fonction permettant une remise à zéro de l'afficheur
- N° 6 BMI : fonction permettant de calculer l'Indice de Masse Corporelle
- N° 7 et N° 8 : permet d'augmenter ou de diminuer le chiffre affiché sur l'écran.
- N° 9 ENTER : fonction permettant de valider les données
- N° 10 HOLD RELEASE : fonction permettant de geler/dégeler le poids affiché

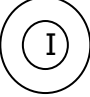
A réception du produit, nous vous conseillons la mise en charge immédiate du fauteuil toute une nuit afin de charger complètement la batterie.

ABILANX

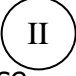

NOTICE SIMPLIFIEE POUR FAUTEUIL H 551

A) PROCEDURE POUR DETERMINER LE POIDS DU PATIENT (sans utilisation de la fonction TARE)

Attention, bien valider que rien ne se trouve sur le fauteuil avant la mise en marche de l'indicateur.

1. Appuyer sur la touche N° 1  pour la mise en route.
L'indicateur affiche 0.0kg.
2. Positionner le patient sur le fauteuil.
Bien valider qu'aucun pied ne touche le sol, pour cela utiliser la palette repose-pieds escamotable.
L'indicateur affiche alors le poids net du patient.

Utilisation de la fonction HOLD :

- Lorsque le poids du patient est affiché, appuyer sur la touche N° 10 
Cette fonction permet de geler le poids affiché du patient, même si ce dernier se retire de l'assise.
Pour annuler cette fonction, appuyer de nouveau sur la touche N° 10 
3. Redescendre le patient du fauteuil, l'indicateur affiche toujours le poids du patient (si la fonction HOLD est active). Sinon, l'indicateur affichera à nouveau et automatiquement zéro : 0.0 kg.
 4. Si la fonction HOLD est active, appuyer de nouveau sur la touche HOLD pour une remise à zéro de l'indicateur.
L'indicateur est à nouveau opérationnel pour une nouvelle pesée.

Utilisation de la fonction BMI : indice de masse corporelle

Lorsque l'indicateur affiche le poids du patient, appuyer sur la Touche N° 6, l'indicateur affiche alors 170.0 (taille moyenne d'un Patient en cm).
Utiliser les touches N°7 et N° 8 pour positionner sur l'afficheur la Taille exacte du patient en cm.
Valider ensuite en appuyant sur la touche N° 9 ENTER.
L'indicateur affiche alors l'IMC en % du patient.
Pour revenir au poids du patient, appuyer sur la touche N° 2 CLEAR.

ABILANX

NOTICE SIMPLIFIEE POUR FAUTEUIL H 551

B) PROCEDURE POUR DETERMINER LE POIDS DU PATIENT (avec utilisation de la fonction TARE)

Si le produit à tarer représente un poids inférieur à 2 kg :

- **Positionner le produit (type alèze ...) sur l'assise avant l'allumage de l'indicateur.**
- **Mise en route de l'indicateur en appuyant sur la touche N° 1**
- **L'indicateur affiche 0.0 kg**
- **Positionner le patient sur l'assise et suivre les recommandations ci-dessus à partir du point N°2.**
- **En fin de procédure, en enlevant le produit de l'assise, l'indicateur affiche alors - - - - -**
- **Appuyer sur la touche N° 5, l'indicateur affiche alors 0.0 kg.**
- **Le produit est prêt pour une nouvelle pesée.**


Si le produit à tarer représente un poids supérieur à 2 kg :

- **Mise en route de l'indicateur en appuyant sur la touche N°1 ON**
- **L'indicateur affiche 0.0 kg**
- **Positionner le produit (type coussin ...) sur l'assise, l'indicateur affiche son poids.**
- **Appuyer sur la touche N°4 TARE, l'indicateur affiche 0.0 kg**
- **Positionner le patient sur l'assise**
- **L'indicateur affiche le poids net du patient**
- **Le patient se relève, l'indicateur affiche 0.0 kg**
- **Retirer le produit (type coussin ...), l'indicateur affiche le poids en négatif**
- **Appuyer sur la touche N°4 TARE, l'indicateur affiche de nouveau 0.0 kg.**
- **Le produit est prêt pour une nouvelle pesée.**

ABILANX

NOTICE SIMPLIFIEE POUR FAUTEUIL H 551

Extinction :

- Manuelle : appuyer sur touche N° 1 
- Automatique : au bout de 2 minutes de non utilisation, extinction de l'indicateur.

Mise en charge : obligatoire toute une nuit par quinzaine :

Connecter le bloc chargeur sur le secteur et au dos de l'indicateur (indicateur éteint).

Vérifier que le voyant au dos de l'indicateur s'allume :

- Rouge pour indiquer que la batterie se charge.
- Vert pour indiquer que la batterie est complètement chargée.

Attention :

- utiliser uniquement le bloc chargeur Abilanx, livré avec le produit.
- Possibilité d'utiliser le produit sur secteur en cas de batterie HS (si batterie HS, merci de les remplacer au plus vite)

Message CNTL sur l'afficheur :

- Ce message s'affiche pour quelques secondes afin de vous alerter sur la nécessité de faire prochainement la vérification périodique annuelle obligatoire. Merci de prendre contact avec votre distributeur afin de recevoir de plus amples informations.

Fournisseur :

Distribué par :

Abilanx
PARK AVENUE
RUE LEON GRIFFON
56890 SAINT AVE
Tél : (+33) 02 97 63 70 46
Fax : (+33) 02 97 63 74 90
contact@abilanx.com
www.abilanx.com

ABILANX PARK AVENUE RUE LEON GRIFFON 56890 SAINT AVE
contact@abilanx.com www.abilanx.com