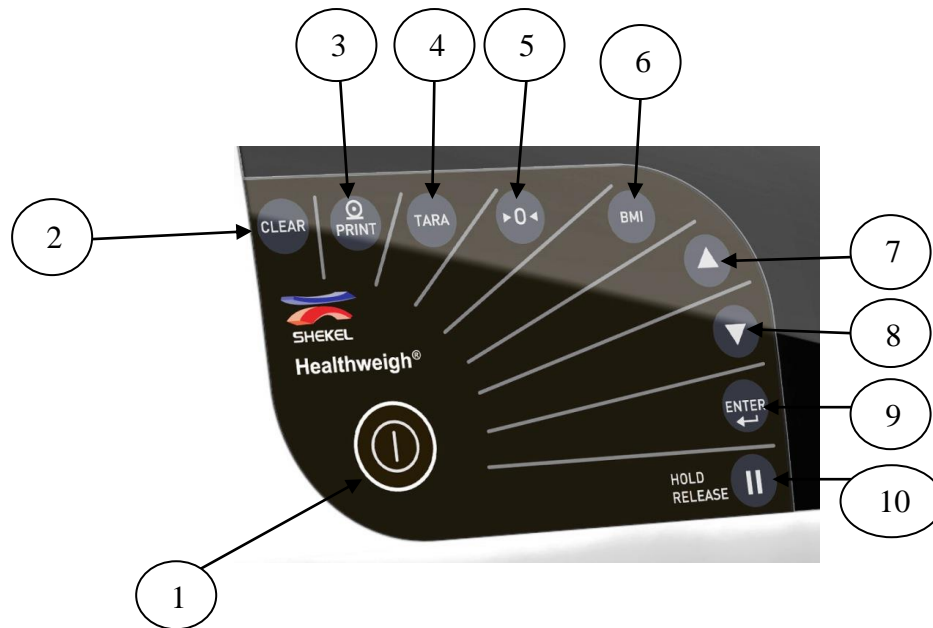


Vue de la façade de l'indicateur



Touches et fonctions :

- N° 1 ON / OFF : mise en route et extinction
- N° 2 CLEAR : fonction permettant d'effacer l'IMC et de revenir au poids affiché
- N° 3 PRINT : fonction permettant d'imprimer le poids affiché
- N° 4 TARE : fonction permettant de tarer un poids posé ou un poids connu
- N° 5 ZERO : fonction permettant une remise à zéro de l'afficheur
- N° 6 BMI : fonction permettant de calculer l'Indice de Masse Corporelle
- N° 7 et N° 8 : permet d'augmenter ou de diminuer le chiffre affiché sur l'écran.
- N° 9 ENTER : fonction permettant de valider les données
- N° 10 HOLD RELEASE : fonction permettant de geler/dégeler le poids affiché

Important :

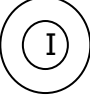
- **A réception, mettre le produit en charge toute une nuit**
- **Possibilité d'utiliser le produit sur secteur en cas de batterie HS (si batterie HS, merci de les remplacer au plus vite)**

ABILANX



NOTICE SIMPLIFIEE POUR PLATE FORME H 351

A) PROCEDURE POUR DETERMINER LE POIDS DU PATIENT (patient en station debout))

Attention, bien valider que rien ne se trouve sur la plate forme avant la mise en marche de l'indicateur.

1. Appuyer sur la touche N° 1  pour la mise en route.
L'indicateur affiche 0.0kg.
2. Positionner le patient sur la plate forme (le patient peut se maintenir sur la main courante).
Bien valider que la tierce personne ne touche en aucun cas la main courante.
L'indicateur affiche alors le poids net du patient.

Utilisation de la fonction HOLD :

Lorsque le poids du patient est affiché, appuyer sur la touche N° 10 
Cette fonction permet de geler le poids affiché du patient, même si ce dernier se retire de la plate forme.
Pour annuler cette fonction, appuyer de nouveau sur la touche N° 10 

3. Redescendre le patient de la plate forme, l'indicateur affiche toujours le poids du patient (si la fonction HOLD est active). Sinon, l'indicateur affichera à nouveau et automatiquement zéro : 0.0 kg.
4. Si la fonction HOLD est active, appuyer de nouveau sur la touche HOLD pour une remise à zéro de l'indicateur.
L'indicateur est à nouveau opérationnel pour une nouvelle pesée.

Utilisation de la fonction BMI : indice de masse corporelle

Lorsque l'indicateur affiche le poids du patient, appuyer sur la Touche N° 6, l'indicateur affiche alors 170.0 (taille moyenne d'un Patient en cm).

Utiliser les touches N°7 et N° 8 pour positionner sur l'afficheur la Taille exacte du patient en cm.

Valider ensuite en appuyant sur la touche N° 9 ENTER.

L'indicateur affiche alors l'IMC en % du patient.

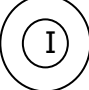
Pour revenir au poids du patient, appuyer sur la touche N° 2 CLEAR.

ABILANX


NOTICE SIMPLIFIEE POUR PLATE FORME H 351


B) PROCEDURE POUR DETERMINER LE POIDS DU PATIENT (patient en fauteuil)

Attention, bien valider que rien ne se trouve sur la plate forme avant la mise en marche de l'indicateur.

1. Appuyer sur la touche N° 1  pour la mise en route.
L'indicateur affiche 0.0kg.
2. Appuyer sur la touche N° 4 « TARE ». L'indicateur affiche alors 15.00
3. Utiliser les touches N°7 et N° 8 afin d'afficher le poids du fauteuil.
4. Valider ce poids tare en appuyant sur la touche N° 9 « Enter »
5. L'indicateur affiche alors le poids du fauteuil en négatif.
6. Positionner le patient en fauteuil sur la plate forme.
Bien valider que la tierce personne ne touche en aucun cas la main courante.
L'indicateur affiche alors le poids net du patient.
7. Redescendre le patient en fauteuil, l'indicateur affiche de nouveau un poids en négatif. Appuyer sur la touche N° 4 « tare », l'indicateur affiche de nouveau 0.0 kg.

Utilisation de la fonction HOLD :

Lorsque le poids du patient est affiché, appuyer sur la touche N° 10 
Cette fonction permet de geler le poids affiché du patient, même si ce dernier se retire de la plate forme.

Pour annuler cette fonction, appuyer de nouveau sur la touche N° 10 

8. Redescendre le patient de la plate forme, l'indicateur affiche toujours le poids du patient (si la fonction HOLD est active). Sinon, l'indicateur affichera à nouveau le poids du fauteuil en négatif. Appuyer sur la touche N° 4 pour revenir à 0.0 kg.
9. Si la fonction HOLD est active, appuyer de nouveau sur la touche HOLD pour une remise à zéro de l'indicateur. Si un poids négatif, appuyer sur la touche N° 4 « tare »
L'indicateur est à nouveau opérationnel pour une nouvelle pesée.


ABILANX

NOTICE SIMPLIFIEE POUR PLATE FORME H 351

Utilisation de la fonction BMI : indice de masse corporelle

- Lorsque l'indicateur affiche le poids du patient, appuyer sur la touche N° 6, l'indicateur affiche alors 170.0 (taille moyenne d'un patient en cm).
- Utiliser les touches N°7 et N° 8 pour positionner sur l'afficheur la taille exacte du patient en cm.
- Valider ensuite en appuyant sur la touche N° 9 ENTER. L'indicateur affiche alors l'IMC en % du patient. Pour revenir au poids du patient, appuyer sur la touche N° 2 CLEAR.

Extinction :

- Manuelle : appuyer sur touche N° 1 
- Automatique : au bout de 2 minutes d'utilisation, extinction de l'indicateur.

Mise en charge : obligatoire toute une nuit par quinzaine :

Connecter le bloc chargeur sur le secteur et au dos de l'indicateur (indicateur éteint).

Vérifier que le voyant au dos de l'indicateur s'allume :

- Rouge pour indiquer que la batterie se charge.
- Vert pour indiquer que la batterie est complètement chargée.

Attention :

- Utiliser uniquement le bloc chargeur Abilanx, livré avec le produit.
- Possibilité d'utiliser le produit sur secteur en cas de batterie HS (si batterie HS, merci de les remplacer au plus vite)

Message :

- **Lorsque l'écran affiche « CNTL » à l'allumage, cela indique qu'il est nécessaire d'effectuer la vérification périodique annuelle obligatoire. Merci de bien vouloir nos contacter afin de vous communiquer la procédure à suivre pour ce type de programmation.**

Fournisseur :

Abilanx
Park Avenue
Rue Léon Griffon
56890 SAINT-AVE
Tél : (+33) 02 97 63 70 46
Fax : (+33) 02 97 63 74 90
contact@abilanx.com
www.abilanx.com

Distribué par :

ABILANX Park Avenue, rue Léon Griffon 56890 SAINT-AVE
contact@abilanx.com www.abilanx.com